



Anleitung

HERZmed Rettungsdecke

1. Zweckbestimmung und Funktionsbeschreibung

- Die HERZmed Rettungsdecke dient als Schutz vor Kälte, Hitze und Schmutz. Ebenfalls kann Sie als Unterlage oder zur Abdeckung eines Patienten verwendet werden.
- Diese ist ausschließlich als Einwegartikel zu verwenden und muss nach Benutzung entsorgt werden.
- Bitte beachten Sie, dass die Gebrauchsanweisung keine ausführliche Schulung / Einweisung des Anwenders ersetzt. Die HERZmed Rettungsdecke darf nur entsprechend ihrer Zweckbestimmung verwendet werden.

2. Anwendung

Die HERZmed Rettungsdecke wird aus der Verpackung entnommen, entfaltet und auf ca. zwei Drittel (Längsrichtung) ausgerollt. Die HERZmed Rettungsdecke in Längsrichtung möglichst dicht an den Körper des Patienten anlegen und diesen mit der Rettungsdecke umwickeln, wobei das Gesicht des Patienten stets frei bleiben muss und nicht zugedeckt sein darf.

- Je nach Indikation kann sowohl die silberne Seite, als auch die goldene Seite angewandt werden. Um den Patienten vor Kälte zu schützen, drehen Sie die Silber-Seite zum Körper. Die Körperwärme wird dadurch reflektiert und eine Unterkühlung verhindert. Um den Körper des Patienten vor Wärme zu schützen, drehen Sie die Gold-Seite zum Körper. Sonnenstrahlen und Wärme werden reflektiert und somit Hitze vom Körper ferngehalten. Wenn der Patient eingewickelt ist kann die HERZmed Rettungsdecke mit einem Pflasterstreifen fixiert werden.

3. Sicherheitshinweise

- Die HERZmed Rettungsdecke darf nur entsprechend der Zweckbestimmung verwendet werden.
- Das Gesicht darf nicht mit der HERZmed Rettungsdecke verdeckt werden und muss immer frei bleiben.
- Die HERZmed Rettungsdecke ist nicht für offene Wunden geeignet.
- Die HERZmed Rettungsdecke darf nur entsprechend der Anwendungsanweisung verwendet werden.
- Zuwiderhandlung birgt Gefahren für Anwender und Patient. Bei Missbrauch kann keine Haftung übernommen werden.
- Abweichungen von der Anwendungsanweisung führen zur Verletzung der CE-Konformität. In solchen Fällen wird die Konformitätserklärung ungültig und die Verantwortung geht auf den Verursacher der Veränderung über.

4. Reinigung und Desinfektion

- Die HERZmed Rettungsdecke ist ein Einmalprodukt, welches nach der Anwendung entsorgt wird und keinesfalls für mehrere Patienten verwendet werden darf.

5. Zubehör

- Für diesen Artikel ist kein Zubehör verfügbar.

6. Montage und Befestigung

- Die HERZmed Rettungsdecke wird bereits in seiner Anwendungsform geliefert. Es sind keine weiteren Montagearbeiten oder Veränderungen vorzunehmen.

7. Ersatzteile

- Für die HERZmed Rettungsdecke sind keine Ersatzteile verfügbar, da es sich um ein Einmalprodukt handelt.

8. Entsorgung

- Die HERZmed Rettungsdecke kann im normalen Hausmüll als Restmüll entsorgt werden. Alle Bestandteile können ebenso recycelt werden.
- Bei Kontakt mit Blut oder Sekret/Exkret ist die HERZmed Rettungsdecke als Sondermüll zu entsorgen, bei welchem aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen getroffen werden müssen. Sollte kein Kontakt zu den oben genannten Substanzen bestanden haben, werden keine besonderen Entsorgungsvorschriften nötig.

9. Lieferumfang

Verpackungseinheit Inhalt	Stk 1 Stück
Bestellnummer	700100
Bezeichnung	Rettungsdecke
Beschreibung	Zweiseitige Rettungsdecke mit je einer goldenen und einer silbernen Seite

10. Technische Daten

Abmessungen (L x B x H in cm)	160 x 200
Foliendicke	12 µm
Packmaß (L x B x H in cm)	7 x 13,5 x 1
Gewicht	0,07 g
Material	Polyethylen (PE) Polyethylenterephthalat (PET)
CE-Kennzeichnung	 (Herstellererklärung in Eigenverantwortung)
MPG Klassifizierung	Klasse I
Sterilität	unsteril
Basis-UDI-DI (GTIN)	4251697700025

11. Zeichenerklärung

Zeichen	Bedeutung
	Konformitätskennzeichnung
	Medizinprodukt
	Bestellnummer
	Chargenbezeichnung
	Hergestellt am
	Haltbar bis

Zeichen	Bedeutung
	Nicht zur Wiederverwendung
	Nicht steril
	Vor Lichteinstrahlung schützen
	Vor Nässe schützen
	Hersteller



HERZmed GmbH

Herkulan-Schwaiger-Gasse 16
82487 Oberammergau

Tel.: +49 (0) 911 / 14 88 959 - 0

Fax: +49 (0) 911 / 14 88 959 - 9

Mail: herzmed@herzmed.de

Web: www.herzmed.de